


Магнитен стимулатор GLAD-X® LS

Glad-X ...
Овладейте ума си

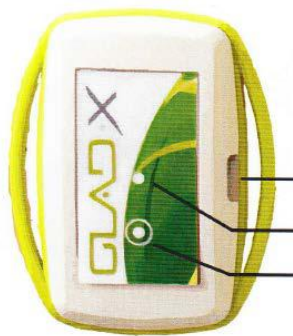


Ръководство за експлоатация

Описание на устройството



Гнездо за зареждане (Micro-USB)
Работен светодиод, многоцветен
Бутон за активиране
Приложение GLAD-X® на вашия смартфон

Легенда

	Внимание! Прочетете преди употреба.
	Устройството не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци.
	Литиево-полимерната батерия трябва да се предава за правилно рециклиране.

Съдържание

Предпазни мерки и странични ефекти	4
Настройка и експлоатация на GLAD-X® LS	5
Инсталиране на приложението GLAD-X®	
Активиране на bluetooth на мобилния телефон	
Стартиране на приложението GLAD-X®	
Ограничаване на прилагането и политика за поверителност	
Свързване с GLAD-X® LS	7
Избор на вид, интензивност и продължителност на стимулацията	8
Настройки и статистика	10
Зареждане на батерията	11

Почистване на GLAD-X® LS	11
Значение на светодиодните кодове	11
Светът на GLAD-X®	12
Модел GLAD-X® LS	14
Модел GLAD-X® Pro	15
Препоръчителни настройки за GLAD-X® LS	16
Важни бележки	17
Транспорт/доставка/изхвърляне/гаранция	18
Талон за ремонт	19
Гаранционен талон/потвърждение за въвеждане	21
Молба за вашата помощ	22
Технически спецификации	23

Импринт

Magnon.Global GmbH, Обермаркт 8, 82515 Волфратсхаузен, Германия
Директор: Оливер Зийман, дм
Данъчен номер 139/132/00696
HRB 233913 Мюнхен
HypoVereinsbank Munchen
IBAN: DE57 7002 0270 0015 8201 06
BIC: HYVEDEMMXXX

Предпазни мерки и странични ефекти:

В случай на странични ефекти преустановете третирането и се консултирайте с Вашия лекар. По време на третирането може да има леко главоболие. Хора с увреден слух или със слухови проблеми могат да забележат леко звънене в ушите след третирането. В редки случаи се появява лека замаяност, усещане за топлина или изтръпване по време на прилагането или непосредствено след приключването му. Алергии към материала на магнитния стимулатор не могат да бъдат изключени. **При деца уредът трябва да бъде използван само под наблюдението на възрастен.**

Не трябва да използвам устройството:

- ако имам пейсмейкър, имплантиран дефибрилатор или други имплантирани електронни устройства с шънтови системи в мозъка и скорошни мозъчни увреждания
- ако имам мозъчен тумор
- при епилепсия или заболявания, които водят до припадъци
- при тежки психични разстройства (психоза, мания, алкохолна или наркотична зависимост)
- в случай на лицева болка (например тригеминална невралгия)
- по време на шофиране, работа с машини или дейности, при които магнитните вълни могат да доведат до смущения или опасност
- по време на вземане на душ, къпане, плуване или други водни дейности
- когато обвивката или покритието на кабела са повредени
- в близост до силни електромагнитни полета
- ако при прилагането има оставени без надзор деца под 18 години

Устройството не трябва да се поставя:

- на други места освен около черепа
- на открити рани, подути или заразени кожни участъци
- при дразнене на кожата заради прилагането

Преди употреба трябва да се консултирате с Вашия лекар относно следните симптоми или ситуации:

- тежък хипертиреозидизъм
- в случай на сърдечна аритмия/сърдечна недостатъчност (всяка от 3-та или 4-та степен)
- в случай на употреба на лекарства за разреждане на кръвта, напр. Маркумар

Настройка и експлоатация на GLAD-X® LS

1. Инсталиране на приложението GLAD-X®

Инсталирайте приложението GLAD-X® от App Store или Google Play, като сканирате някой от QR кодовете или просто потърсите "glad-x" в магазините. Изберете "Инсталиране" и изчакайте приключването на инсталационния процес.



GLAD-X® App in the

Google Play Store



GLAD-X® App in

Apples App Store

2. Активиране на bluetooth на мобилния телефон

Вашият мобилен телефон ще се свърже с вашия GLAD-X® LS чрез bluetooth. За да сте сигурни, че bluetooth комуникациите са активирани, отидете на "Настройки" на вашия мобилен телефон и след това на "Връзки". Включете "Bluetooth", ако вече не е активиран. Ако е необходимо, разгледайте инструкциите за експлоатация на вашия смартфон.

На този етап не е необходимо да търсите или сдвоявате вашия GLAD-X® LS. Този процес ще бъде извършен по-късно от приложението по прост начин.

3. Стартиране на приложението GLAD-X®

Натиснете иконата за стартиране на приложението GLAD-X®. Появява се приветстващият екран на GLAD-X. Ако се появи въпрос относно достъпа до местоположението на вашето устройство, моля, отговорете с "Разреша".

4. Ограничаване на прилагането и политика за поверителност

Само при първото стартиране на програмата ще бъдете помолени да обърнете внимание на ограниченията на прилагането и политиката за поверителност и да потвърдите това с кликване.

За да направите това, натиснете "Ограничения" и "Политика за поверителност" едно след друго и потвърдете чрез натискане в края на текста (може да се наложи да приплъзнете надолу, за да прочетете текста изцяло), че сте прочели и разбрали текстовете.

Докато не потвърдите двата текста, не можете да продължите с приложението GLAD-X®. С "ОК" отново се връщате в главното меню.

След това и всеки път, когато стартирате програмата, ще бъдете посрещнати от "изчистен" начален екран, където можете да извикате импринта или да продължите с настройката (при първото извикване) и експлоатацията на вашия GLAD-X® LS.


5. Свързване с GLAD-X® LS

Сега активирайте функцията "Bluetooth" на контролния блок на магнитния стимулатор. Натиснете бутона (бял кръг с бяла точка) за около 1 секунда. Светодиодът мига в синьо два пъти в бърза последователност на всеки две секунди.

След натискане на "Старт" приложението автоматично търси GLAD-X® LS в близост и го показва като Glad X LS XXXX, където XXXX е четирицифрен номер, който съответства на серийния номер на вашия GLAD-X® LS.

Натискането върху името ще установи връзка с вашия GLAD-X® LS. Първия път, когато се свържете с вашия GLAD-X® LS, ще бъдете подканени да въведете ПИН "000000". Тук въведете числото 0 (нула) шест пъти и потвърдете с ОК.

Перфектното вдвояване се потвърждава с голям зелен тик, преди екранът да се промени в преглед на стимулационните протоколи.

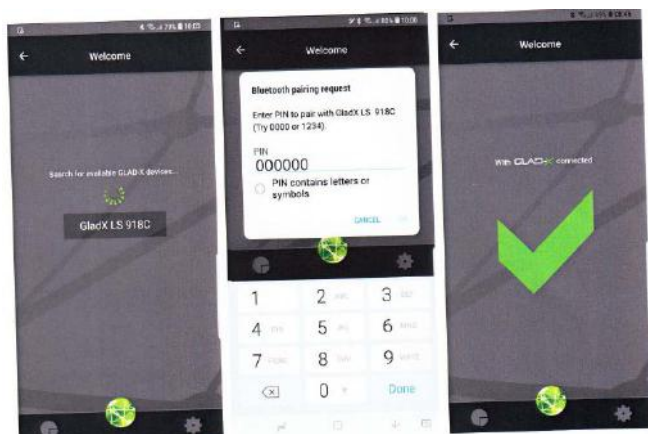


6. Избор на стимулация, интензивност и продължителност

Изберете стимулация чрез натискане. След като изберете програмата, ще бъдете помолени последователно да изберете интензивността и продължителността чрез бутони. Препоръчваме да изберете интензивност 100%, за да постигнете максимален ефект в избраната от вас програма.

За силно чувствителни хора обаче избирането на по-ниска интензивност може да доведе до по-удобно усещане.

Продължителността на прилагането се избира в следващото меню.

На стр. 16 ще намерите таблица с препоръчителните настройки за желания ефект. Това са само препоръки, използвайте GLAD-X® LS толкова често и толкова дълго, колкото ви е удобно.

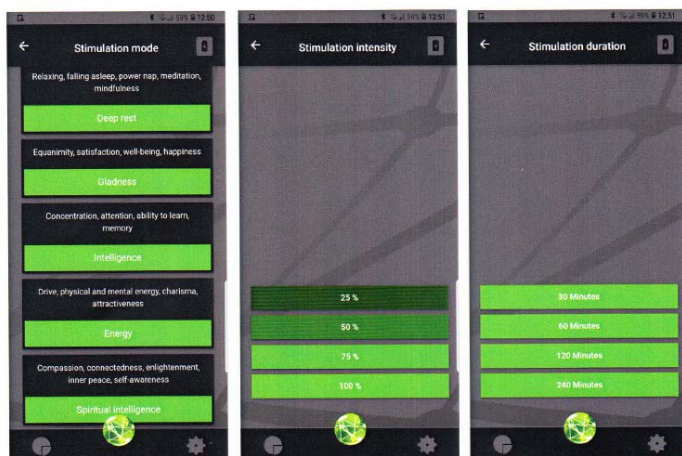


Сега поставете GLAD-X® LS на главата си, така че удобството при носене да е оптимално. Чрез натискане на "Старт" стимулацията започва с избраната сила и продължителност.

Синият светодиод сега светва веднъж на две секунди и вашият смартфон ще покаже оставащото време за стимулация. Ако сте избрали това в настройките, след приключване на избраната програма ще се чуе звуков сигнал.


След приключване на избраната стимулация ще бъдете помолени да направите цялостна оценка на удовлетвореността и качеството на съня.

Просто натиснете синята или жълтата скала между 1 и 10. Изборът ви е обозначен със зелена стрелка. Моля, запазете стойностите.

Приложението GLAD-X® ви благодари за използването и GLAD-X® LS ще бъде изключен. Натискайки "Начална страница", се връщате към приветстващата страница. Ако искате да извършите друго третиране с GLAD-X® LS, трябва отново да включите GLAD-X® LS и да се свържете с приложението.

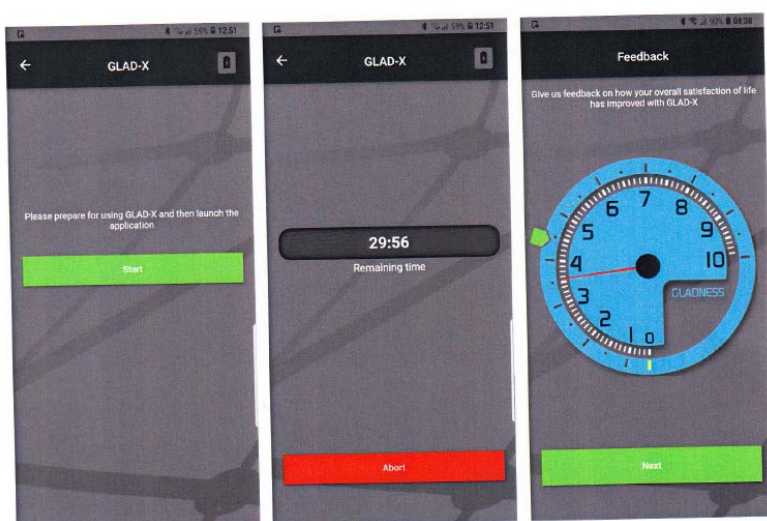


7. Настройки и статистика

На началния екран са достъпни функциите "Настройки" и "Статистика". Натиснете  , за да въведете настройките. Тук можете да промените езика между немски и английски.

Когато избирате звук, можете да изберете кликания по време на третирането (едно кликане за всеки магнитен импулс), както и краен сигнал след приключване на програмата за стимулация. Специално за програми, подпомагащи съня, е препоръчително да дезактивирате и двата сигнала. Можете да дезактивирате и синия светодиод в това меню.

Ако въведете името си, в бъдеще ще бъдете поздравявани лично от приложението GLAD-X®.

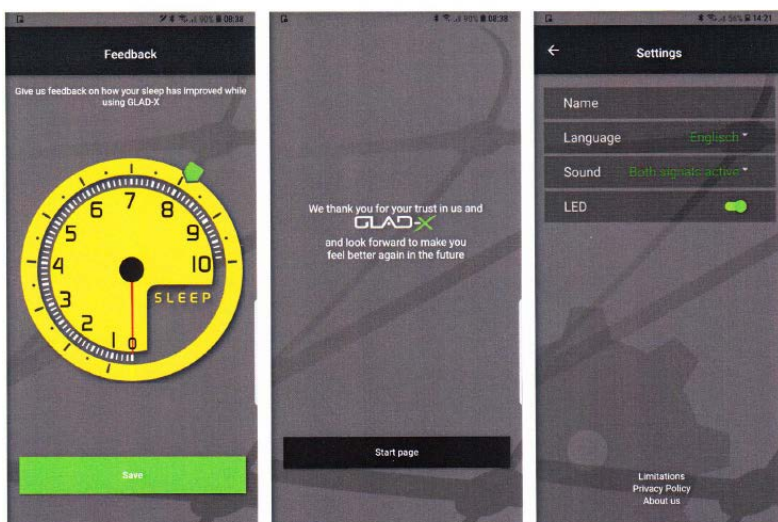

Чрез "Статистика" ще получите преглед на последните си приложения, по-специално на вида, продължителността и интензивността на стимулациите.



8. Зареждане на батерията

За да заредите батерията, свържете захранващия адаптер към зареждащия кабел и GLAD-X® LS. Сега светодиодът мига в зелено два пъти, следвано от 2 къси сини премигвания. Когато батерията е напълно заредена, една зелено премигване е следвано от две сини.

Когато изваждате зареждащия кабел от GLAD-X® LS, внимателно издърпайте кабела от контакта, докато държите стабилно контролера.

Когато батерията е почти напълно разредена, червеният светодиод мига два пъти. Моля, свържете зареждащия кабел възможно най-скоро. В този случай процесът на зареждане започва с оранжев светодиод, който мига два пъти.

Животът на батерията се подобрява, ако броят на циклите на зареждане е сведен до минимум, т.е. ако батерията е изтощена до голяма степен, преди да бъде заредена. Независимо от това, можете да зареждате вашия GLAD-X® LS, когато пожелаете.

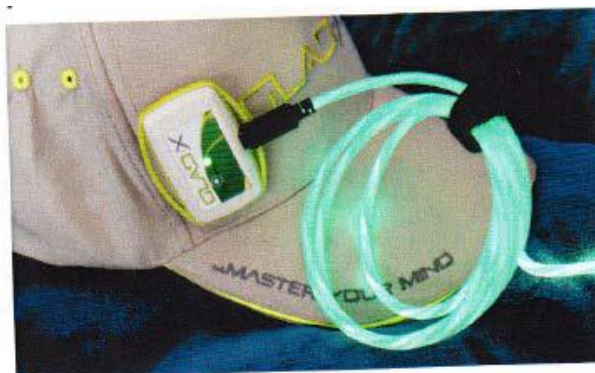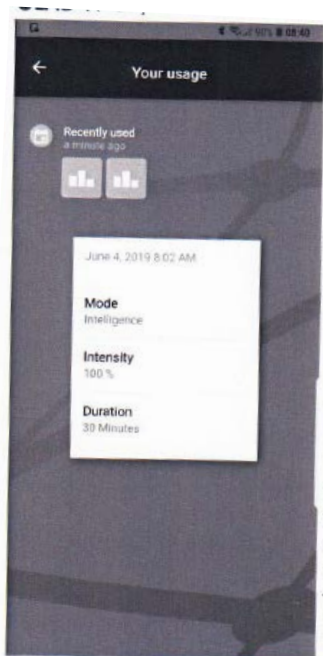

9. Почистване на GLAD-X® LS

За почистване на шапката препоръчваме влажна кърпа. Шапката в никакъв случай не трябва да се пере, тъй като това би повредило електрониката на контролния блок и намотките.

10. Значение на светодиодните кодове

Значението на светодиодните кодове можете да видите в следващата таблица. Възможни са комбинации, което означава, че мигането два пъти зелено и два пъти синьо означава, че батерията се зарежда и едновременно с това GLAD-X® LS е готов за свързване чрез bluetooth.

Батерията е почти разредена	2 пъти червено
Bluetooth активен, готов за свързване	2 пъти синьо

Glad-X® LS е свързан с приложението	1 път синьо
Батерията се зарежда	2 пъти зелено
Батерията е напълно заредена	1 път зелено
Изтощената батерия се зарежда	2 пъти оранжево

Светът на GLAD-X®

LS

Pro

Модели GLAD-X® LS

GLAD-X® LS е изработен от издръжлив полиестер и се предлага в четири различни цвята. Размерът на всички модели може да се променя неограничено чрез закопчалка с велкро. Имате избор между пустинен крем, нежно зелено, тропическо синьо и морско синьо.

Модели GLAD-X® Pro

По-мощният GLAD-X® Pro се предлага в две версии за възрастни в атрактивен син и модерен антрацитен цвят и в още две в идеалния размер от 50 см (20") за деца в светлосин и червен цвят. **Pro Boy** се доставя със стикер на пират, а **Pro Girl** - със стикер на единорог, които при желание могат да бъдат лесно прикрепени.



PRO Girl (червено)	50 cm 20 in
PRO Boy (светло синьо)	50 cm 20 in
PRO Blue (синьо)	58 cm 23 in
PRO Grey (антрацит)	64 cm 25 in

Препоръчителни настройки за GLAD-X® LS

Гретиране	Програма	Приложение	Препоръки
Привлекателност	Енергия	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Очарование	Енергия	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Съчувствие	Духовна интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Концентрация	Интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Импулс	Енергия	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Просветеност	Духовна интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Самообладание	Радост	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден
Заспиване/по-добро качество на съня	Дълбока почивка	30 минути	През нощта, изключване на сигналите
Чувства на глобална принадлежност	Духовна интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Щастие	Радост	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден
Вътрешен мир	Духовна интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Умения за учене и запаметяване	Интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Медитация	Дълбока почивка	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден
Осъзнатост	Дълбока почивка	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден
Физическа и умствена енергия	Енергия	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Възстановителна дрямка	Дълбока почивка	30 минути	Навийте будилника за 10-15 минути
Самосъзнание	Духовна интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Спокойствие	Радост	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден
Умствена свежест	Интелигентност	30 минути 2 пъти на ден	Сутрин, на обяд
Благосъстояние	Радост	30 минути 2-4 пъти на ден	Препоръчва се през целия ден

Важни бележки

В случай на повреда на магнитния стимулатор, моля, незабавно изключете цялото устройство и го изпратете на Magnon.Global GmbH за ремонт или го предайте на вашия консултант специалист.

Изрично отбелязваме, че това е електрическо устройство. Поради тази причина шапката, кабелите или захранването не трябва да влизат в контакт с вода, с която хора или животни са в контакт или могат да влязат в контакт. В допълнение устройството може да бъде повредено. Моля, не използвайте устройството в стая с висока влажност.

За да почистите контролния блок и захранването, моля, извадете микро-USB кабела. За почистване на шапката препоръчваме влажна кърпа. Когато изваждате USB зареждащия кабел, не забравяйте да държите здраво контакта и в същото време контролния блок, за да не се повредят кабелът и контролният блок.

Моля, уверете се, че микро-USB кабелът е открит по време на процеса на зареждане и не е притиснат (от врата, легло, стол и др.). Това може да доведе до скъсване на кабела и като последствие до запалването му поради късо съединение.

GLAD-X® LS не съдържа самозаменящи се или саморемонтиращи се части. Също така не е възможно да смените батерията сами. Всички доставени части трябва да бъдат отваряни, ако е необходимо, само от Magnon.Global GmbH. Отварянето на тези части (лента за глава с контролен блок, зарядно устройство) от вас самите или от други лица ще анулира гаранцията.

Избягвайте използването на карти с магнитна лента в магнитното поле. Все още не знаем за случаи, при които са причинени повреди, но съществува теоретична възможност за изтриване на данните от магнитната лента на такива карти.

Препоръчваме да изберете настройката за време и интензивност, както е препоръчано от вашия консултант по магнитни полета.

Предоставяйте GLAD-X® LS само на хора, които са прочели внимателно инструкциите и са ги разбрали. Използването е разрешено само в областите на приложение, описани в ръководството за експлоатация; всяко друго използване ще анулира гаранцията.

GLAD-X® LS не е подходящ за деца под 3-годишна възраст. Деца под 18 години трябва да бъдат под наблюдение на възрастен.

Бихме искали изрично да отбележим, че тези бележки трябва да бъдат спазвани!

Съхранение

Устройствата с магнитно поле трябва да бъдат оптимално съхранявани в сухо помещение при температура, не по-ниска от 10°C (50°F).

Транспорт/доставка

Ако се качвате на самолет, погрижете се да оставите устройството изключено по време на излитане и приземяване или спазвайте инструкциите на екипажа на самолета.

Изхвърляне

Моля, имайте предвид, че системата с магнитно поле никога не трябва да се изхвърля в кофата за боклук.

Ако желаете да изхвърлите системата с магнитно поле, ви молим да не връщате устройството на местната фирма за събиране на отпадъци, а да го върнете на нас. След това ние ще се погрижим за правилното изхвърляне на всички компоненти.

Гаранция

Magnon.Global GmbH предлага 2-годишна гаранция за системата с магнитно поле от датата

на закупуване. Дефектни устройства или части след изпращането им на Magnon.Global GmbH ще бъдат подменени или ремонтирани безплатно за гаранционни случаи в рамките на гаранционния период. Доставка до Magnon.Global GmbH се заплаща от клиента. Magnon.Global GmbH връща доставката безплатно. В случай на повреди, причинени от намеса на клиента или трети страни, гаранцията се анулира.

Технически спецификации

Тип:	GLAD-X® LS
Капацитет (батерия):	350 mAh
Устройство за работно напрежение:	3.7VDC
Клас на приложение:	BF
Регулируеми честоти:	в зависимост от програмата
Максимална интензивност на полето:	00 mT (номинална стойност: 50 mT)
Автоматично изключване:	след 3 минути, ако не се установи връзка чрез bluetooth след 5 минути, ако не е избрана програма или програмата е приключила
Изключване на сигнализацията:	звук по избор след 30 до 240 минути
Зареждащ кабел:	USB 2.0 A към микро-B конектор (5V)
Управление:	чрез приложение: от Android в. 5 или по-нова/от iOS в. 5 или по-нова
Оптимални условия на околната среда:	
Температура:	оптимално от +10 до +35°C, по-високи/по-ниски температури скъсяват живота на батерията
Относителна влажност:	10 до 80% (без конденз)
Последна актуализация на ръководството за експлоатация:	01.07.2019 г., в. 1.08

Glad-X ...Овладейте ума си
www.glad-x.com